




Hydragel

Vaskemiddel til forvask

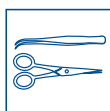

Et forbehandlingsprodukt for kontaminerte instrumenter som ikke vaskes umiddelbart etter bruk. Forhindrer at organiske materiale tørker inn, hindrer vekst og spredning av mikrober. Produktet er CE merket.

Bruksområde

Forvaskemiddel i situasjoner der instrumenter ikke blir rengjort umiddelbart etter bruk. Hydragel sprayer direkte på de forurensede instrumentene for å forhindre at organisk materiale tørker inn samt hindre vekst og spredning av mikrober.

Medisinsk utstyr, for profesjonelt bruk.

Produktegenskaper

Den gel-liknende sprayen er enkel å bruke og danner en mikrobe-tett overflate på instrumentene. Gelmembranen forhindrer at skitt og organisk materiale tørker på instrumentene, i tillegg til å hindre spredning og oppvekst av mikrober. Effekten varer i 5 dager. Om nødvendig kan produktet også brukes som vaskeforsterker for instrumenter som er vanskelige å rengjøre. Passer for ofte brukte materialer. Hydragel er vannløselig og skylles lett bort fra overflaten på instrumentene. Passer for ofte brukte materialer; ikke egnet for kobber eller messing.

Bruksanvisning

Bruk en oppbevarings- / transportboks med lokk. Spray Hydragel på instrumentene som ligger i boksen. Spray på instrumentene forsiktig med gelen. Følg sikre arbeidsmetoder når du lagrer og transporterer instrumenter. Vask instrumentene som vanlig.

Merk

Unngå kontakt med kjemikalier som kan korrodere eller skade metaller. De kan forbli aktive under geloverflaten. Sprut og flekker kan gjøre gulvet glatt. Rengjør med vann. Les bruks- og sikkerhetsinstruksjonene i sikkerhetsdatabladet.

Innhold

Aktive stoffer

Alkanolaminosalter fra fettsyrer 5 - 15%

Ikke-ioniske surfaktanter < 5%

2-phenoxyetanol

Rustmiddel

Ikke-skummende middel

pH konsentrat

9.0

Oppbevaring

Lagringstemperatur under 28 ° C. Holdbarhet 3 år fra produksjonsdato.

Produksjonsland

FINLAND

**Bruker- og
miljøsikkerhet**

Produktet er biologisk nedbrytbart. Råvarene er miljøvennlige. Emballasjen er laget av PE-HD-plast som er et miljøvennlig, fullstendig resirkulerbart og brennbart materiale.

**Forpakningsstørrelse Salgsenhet
/ Artikkel nr.****Artikkel nr.****GTIN****GTIN (salgsenhet)**

6 x 750 ml

8222

6417964082227

6417964482959

**Tilleggsinformasjon**

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.